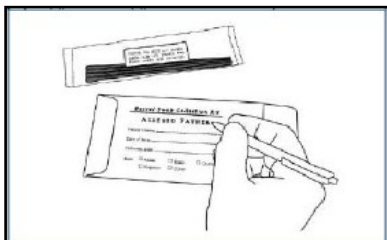


**Mintavételi eljárás a DNS alapú genetikai vizsgálat elvégzéséhez**

Kérjük, először olvassa el a tájékoztatót végig, és csak ezt követően kezdjen hozzá a mintavétel kivitelezéséhez

**Első lépés:****A mintavételi boríték kitöltése - OLVASHATÓAN, NAGY BETŰKKEL!**

Vegye ki a borítékból a mintavételi pálcákat tartalmazó csomagokat, és tegye félre. A borítékon jelölje be, illetve írja rá a vizsgálandó személy vizsgálati státuszát (például: „Gyermek”, „Anya”, „Feltételezett apa”, „Más személy” („Feltételezett nagypapa”, „Testvér”, „Ikertestvér” stb.).


A boríték MAGYAR feliratánál látható mezőket töltsse ki, a boríték ANGOL nyelvű oldalát hagyja üresen. „A vizsgált személy neve vagy jeligéje” sorba beírhatja a személy nevét, de beírhat jeligét, számot, illetve ezt a sort kitöltetlenül is hagyhatja.

**Második lépés:****A vizsgálati anyag (minta) levétele**

Nyissa ki a jelölt részen a mintavételi pálcákat tartalmazó tasakokat (a jelölt rész a pálcák vattával borított részével ELLENTÉTES oldalon található). Vegyen ki egy mintavételi pálcát úgy, hogy közben fokozottan ügyeljen arra, hogy a pálcá vattával borított részéhez nem szabad hozzáérnie semminek. Egy személy esetében összesen 4 pálcát (2 csomagot) kell felhasználni.

A vizsgált személynek nagyra kell nyitnia a száját. A mintavételi pálcá vattával borított részével tízszer erőteljesen hátra-előre mozgatva a szájüreg nyálkahártyájához dörzsölve mintát kell vennie. A mintavétel során ügyeljen arra, hogy 1-1 mozdulat között fordítson egy picit a pálcán –így a 10 dörzsölés végére a pálcá teljes felületére sikerül mintát juttatni. A szájüreg másik

oldalánál hasonló módon járjon el. Összesen tehát jobb- és baloldalon két-két mintavételi pálcával 10-10 nyálkahártya dörzsöléssel megfelelő mennyiségű hámsejthez lehet jutni, ami lehetővé teszi a vizsgálat elvégzését. Elégtelen mintavétel megakadályozhatja a vizsgálat kivitelezését.

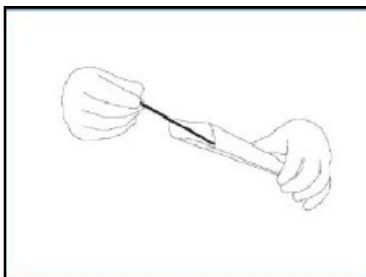**Harmadik lépés:****A mintavételi pálcák borítékba helyezése**

A szájüregből kivett mintavételi pálcákat tegye közvetlenül a papírborítékba, és hagyja ott megszáradni azokat (ne tegye vissza a mintavevő pálcát a saját csomagolásába!).

A boríték a behelyezett mintavevőktől át szokott nedvesedni, de ez nem baj, pár óra alatt szobahőmérsékleten megszárad.

Mind a négy mintavételi pálcával hasonló módon járjon el. Amikor a mintavételt egy személy esetén befejezte, a borítékot zárja le.

**Negyedik lépés:****Minden vizsgálandó személy esetében ismételje meg az első három lépést!**

Ne felejtse el az összes mintavételi borítékot megfelelő módon jelölni.

Minden vizsgált személy esetében használja mind a négy mintavételi pálcát!

**Ötödik lépés:****Töltse ki a vizsgálati kéréslapot**

A mellékelt kéréslapot töltsse ki a megfelelő adatokkal. Névtelen, anonim vizsgálat esetén természetesen nevek, címek beírása nem szükséges, azonban olyan jelszó, jelige, szám feltüntetése elengedhetetlen, ami alapján az eredményt megfelelő helyre, vagy módon tudjuk továbbítani (e-mail cím, postai cím, személyes átvétel). Telefonon, sms-ben nem adunk ki eredményt. Kérjük, jelölje be a „Rasz” kérdéskörnél is a megfelelő négyzetet – erre a megbízható statisztikai analízis számítások elvégzése miatt van szükség – ez elengedhetetlen a pontos valószínűségi érték kiszámításához. Ha ez nem történne meg, akkor a laboratórium a „Kaukázusi (fehér bőrű)” rasszhoz való tartozást utólag bejelöli.

**Mintavételi eljárás a DNS alapú genetikai vizsgálat elvégzéséhez**

Kérjük, először olvassa el a tájékoztatót végig, és csak ezt követően kezdjen hozzá a mintavétel kivitelezéséhez

Amennyiben a mintavételi eszközt a Szakértői Irodában vette át, kérjük, hogy juttassa vissza oda a mintákat és a kitöltött vizsgálati lapot. Ha mintavételi eszközt postán kapta, vagy személyes visszajuttatásra nincs lehetőség, akkor küldje vissza a vizsgálati anyagot a kérelmekkel együtt a következő címre:

**Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft.**

**1137 Budapest, Katona József utca 41. fszt 2.**

A küldeményt egyszerű levélként vagy elsőbbségi levélként adja fel. Ha könyvelt küldeményként küldi (ajánlott, tértivevényes), akkor számítsa arra, hogy a feldolgozás hossza megnőhet, akár egy héttel is.

**A vizsgálat díjának megfizetésére négy lehetősége van (bármelyiket választhatja):**

1. **utalja át** a teljes összeget a Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. számlaszámára:  
**1010 2086 – 3511 6200 – 0100 3002** (Budapest Bank).  
Külföldi utalás esetén: IBAN kód: HU88-10102086-35116200-01003002; SWIFT/BIC: BUDAHUHB
2. fizesse be a teljes összeget a mintavételi csomagban található **sárga postai csekken**
3. személyes minta-leadás, vagy mintavétel esetében, a Szakértői Irodában Maestro vagy MasterCard **bankkártyával** is kifizetheti a vizsgálati költséget.
4. a honlap **Webshop oldalán keresztül** bankkártyával, vagy PayPal fizetéssel kifizetheti a megrendelt vizsgálatot.

A kérelepon tüntesse fel a befizetett/átutalás összeget, a fizetés időpontját („A kért vizsgálat” sor jobb szélénél). Csekkes fizetés esetén küldje el az igazolószerződés másolatát. Amennyiben a befizetett összegről, a fizetés módjáról és/vagy idejéről nem nyilatkozik, akkor a vizsgálatot addig nem kezdjük meg, míg egyértelmű igazolás nem érkezik a befizetésről (banki- vagy postai visszaigazolás), ez általában 10-14 nap múlva érkezik meg – ebben az esetben két-három héttel később készül el az eredmény. Alapesetben a vizsgálati eredmény a minta megérkezésétől számított legkésőbb 14. napig elkészül. Bizonyos speciális vizsgálatok esetében a leletkiadás időpontja ennél hosszabb is lehet.

Az átutalás megérkezésekor eljuttatjuk a vizsgálati eredményt elektronikus és nyomtatott formában az Ön által megadott címre, valamint az Ön által megadott adatokra kiállított számlát.

Bármilyen kérdés esetében forduljon hozzánk bizalommal:

**telefon: 06 20 373 5580**

**honlap: [www.dnskozpont.hu](http://www.dnskozpont.hu)**

**e-mail: [dbsiroda@gmail.com](mailto:dbsiroda@gmail.com)**

**FONTOS INFORMÁCIÓ, KÉREM OLVASSA EL:**

Mi történhet, ha valaki esetleg szándékosan mástól küld be mintát, mint amiről nyilatkozik?

Az apasági vizsgálat hivatalos változatában (jegyzőkönyvezett mintavételen alapuló DNS vizsgálat) a vizsgált személyeket fényképes igazolványaik alapján azonosítjuk be, melyekről másolat készül. A mintavétel során a mintát adó személyekről digitális fényképfelvételek készülnek, melyek rögzítik a mintavétel pontos időpontját és helyét GPS adatok alapján. A felvett jegyzőkönyveket a helyszínen mindenki aláírja – ennek megfelelően az ilyen mintavételek során a szándékosan meghamisított DNS minta vizsgálata nem lehetséges.

Postai beküldés esetén, otthoni mintavétel után ezt természetesen nem tudjuk garantálni, ezért az ilyenkor megadott neveket is jellegként kezeljük, és a leleten feltüntetjük, hogy a mintavétel nem volt ellenőrzött, ezért az eredmény hatósági felhasználásra nem alkalmas.

Ha ennek ellenére valaki más DNS-ét küldi el a feltüntetett helyett, és az így kapott eredménnyel visszaél (például apasági nyilatkozat megtételére, vagy elutasítására vesz rá valakit), és ez alapján megváltozik a családi jogállás, akkor az illető bűncselekményt követ el (családi jogállás megsértése: Btk 213. §), és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik. Amennyiben mi erre utaló információt kapunk, megteszük a feljelentést. A vizsgálat kérésekor a vizsgálatkérő aláír egy nyilatkozatot, melyben ezt tudomásul veszi, és ennek ismeretében kéri a vizsgálatot. Magyarországon az összes DNS alapú leszármazási vizsgálatot végző laborban hasonlóan járnak el, mivel ezt törvény szabályozza.